

# Die richtige Pflege

## Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben

Zur Erhaltung der Kompressionswirkung sollten Ihre medizinischen Kompressionsstrümpfe regelmäßig gewaschen werden. Dies ist nicht nur aus hygienischen Gründen wichtig, sondern stellt auch die Festigkeit der durch das Tragen geweiteten Strümpfe wieder her.

### Beim Waschen beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:



Zum sofortigen Gebrauch geeignet. Unsere Empfehlung: vor dem ersten Gebrauch waschen. Danach möglichst tägliche Wäsche, mind. jedoch jeden zweiten Tag.



Trocken lagern und **vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**



**Nur auf links waschen und trocknen**



Wassertemperatur bis 40° C



BELSANA Kompressionsstrümpfe und insbesondere silikonbeschichtete Haftbänder sollten niemals mit Lösungsmitteln, stark fettenden Salben oder rückfettenden Lotionen und Cremes in Berührung kommen. Benutzen Sie zur Hautpflege Callusan Cremeschäume, die schnell und rückstandslos einziehen und mit Ihren Strümpfen absolut verträglich sind.

**blau40**

Zur schonenden Pflege empfehlen wir Ihnen das Spezialwaschmittel BELSANA blau40.



Keinen Weichspüler verwenden



Einwandfreies Schuhwerk sowie sorgfältige Fußpflege schonen die Fasern und tragen zu einer langen Lebensdauer Ihrer medizinischen Kompressionsstrümpfe bei.



Gut ausspülen, nicht schleudern oder wringen – nur leicht ausdrücken



Auf einem Handtuch an der Luft oder im Schongang Ihres Trockners trocknen.  
**Strümpfe nicht auf der Heizung oder in der Sonne trocknen!**



Abstehende Faserenden können zur Bildung von Faserknötchen (Pilling) führen. Dies ist ein normaler Vorgang, der bei allen Textilien auftreten kann und ist kein Reklamationsgrund.



Nicht bügeln



Nicht chemisch reinigen



Defekte Strümpfe bitte nicht selbst reparieren! Eine fachgerechte Reparatur wird nur über Ihre Apotheke gewährleistet.



Nicht bleichen

**Haben Sie noch weitere Fragen? Wir beraten Sie gerne.  
Ihre BELSANA Apotheke**